



Ankaferd Blood Stopper®

Blutstillung in der Gastroenterologie

- Anwendbar mit allen am Markt befindlichen Sprüh- und Applikations-Kathetern
- Einfache Handhabung ohne spezielle Vorbereitung
- Flüssig – klar – natürlich – sicher



Was ist Ankaferd Blood Stopper® (ABS)?

Ankaferd Blood Stopper® (ABS) ist ein flüssiges, rein pflanzliches, bewährtes blutstillendes Produkt für ALLE zu behandelnden Indikationen im oberen und unteren Gastro-Intestinal-Trakt. ABS enthält keine menschlichen Blutderivate, tierisches Gewebe, chemische Produkte und keinerlei alkoholischen Bestandteile. ABS ist somit 100% pflanzlich.

Woraus besteht Ankaferd Blood Stopper® (ABS)?

Die besten Eigenschaften von 5 verschiedenen Pflanzen (Thymus vulgaris, Glycyrrhiza glabra, Vitis vinifera, Alpinia officinarum und Urtica dioica) verbinden sich in Ankaferd Blood Stopper® zu einem einmaligen Produkt.

Wie wirkt Ankaferd Blood Stopper® (ABS)?

Die durch Ankaferd Blood Stopper® (ABS) induzierte Bildung des einzigartigen Proteinnetzwerks innerhalb der vitalen erythroiden Aggregation deckt den gesamten physiologischen, hämostatischen Prozess ab. Dieser Prozess findet unabhängig von Gerinnungsfaktoren (II, V, VII, VIII, IX, X oder XIII) statt und ist somit auch bei Gerinnungsproblemen jeglicher Art (z.B. von Willebrand Syndrom, Hämophilie, Thrombozytopenie oder bei einer medikamentösen Blutverdünnung durch Marcumar oder ASS, Vitamin K-Mangel, Fibrinogenmangel, Protein C-Mangel) einsetzbar und effektiv.

Anwendung von Ankaferd Blood Stopper® (ABS) in der Gastroenterologie

Ankaferd Blood Stopper (ABS) kann zur schnellen wirksamen Blutungskontrolle im oberen und unteren Gastro-Intestinal-Trakt eingesetzt werden. ABS findet seine Anwendung:

- nach Eingriffen wie EMR/ESD
- bei Ulkusblutungen
- zur signifikanten Reduktion von Nachblutungen
- bei Post-Polypektomie
- bei Tumorblutungen
- bei großflächigen Ulcerationen

Anwendung

Die ABS-Solution ist in der 5 ml- oder 10 ml-Spritze verfügbar und wird über die, in der Klinik vorhandenen, Sprüh- oder Applikations-Katheter aufgetragen.

- Auftragen per Sprühkatheter 1,8 oder 2,3 mm oder einem adäquaten Applikationskatheter
- Lagerung bei Raumtemperatur
- Kein zusätzliches Equipment

Es sind keinerlei weitere Hilfsmittel zur Applikation notwendig. Die Anwendung kann sofort und unmittelbar nach ärztlicher Freigabe erfolgen.

Bestellung

Bezeichnung	Volumen	Menge	Bestell-Nr.
ABS-Solution	5 ml	1	2025-ABS-AWT-5,0 - 1*
ABS-Solution	10 ml	1	2025-ABS-AWT-10,0 - 1*
ABS-Solution	5 ml	6	2025-ABS-AWT-5,0 - 6*
ABS-Solution	10 ml	6	2025-ABS-AWT-10,0 - 6*

*Abrechenbar via OPS

Wieser Medizintechnik und Geräte GmbH

Eichenstraße 4

D-82281 Egenhofen

Telefon: 08134-99290

Telefax: 08134-99292

Mail: kontakt@wiesermedizintechnik.de

